

Adhésif amelo dentinaire auto mordançant pour les restaurations dentaires à base de résine  
et pour la protection de la dentine

# Hybrid Bond

**35 secondes seulement !!**



- Sans mordantage préalable.... une seule couche !!
- Sans mélange grâce aux Microbrushes® chimiquement actives !!
- Compatible avec toutes les lampes !!
- Joint très fin et très résistant !!



 **SUN MEDICAL**

# Hybrid Bond

## Restauration directe en composite



Appliquer



Photopolymériser



Polir



Cas terminé

## Restauration indirecte



Dent préparée



Application




Prêt pour l'empreinte

## UN COLLAGE TRES FACILE EN 35 SECONDES


Pas de mordantage préalable, juste une couche !

La procédure ne prend que 35 secondes tout compris !!


SEULEMENT **35** SECONDES !

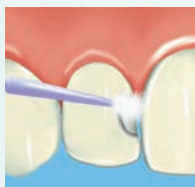

Appliquer  
20 sec

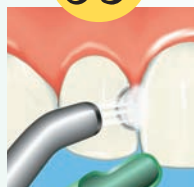

Sécher  
10 sec

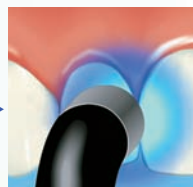

Photopolymériser  
5 sec  
Avec lampe halogène

## COMPATIBLE AVEC TOUS LES COMPOSITES ET TOUTES LES LAMPES

Halogene, Xenon (Arc à Plasma), LED (diodes)

Hybrid Bond adhère à tout type de composite (auto, photo, dual) et polymérise avec toutes les lampes.

## UN COLLAGE PUISSANT


Une adhérence très forte à l'émail, à la dentine et au composite... grâce au monomère 4-META !

Hybrid Bond infiltre la dent pour former une couche hybride type 4-META et constituer ainsi une couche de protection très résistante.

## UN JOINT TRES FIN ET TRES RESISTANT

Seulement 9 microns mais aucune sensibilité post-opératoire !


Une seule couche suffit pour bloquer tout stimulus mécanique ou chimique en direction du complexe dentino-pulpaire.

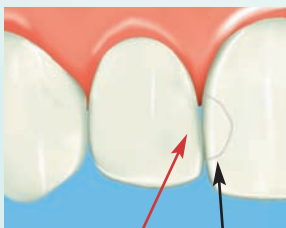

Hybrid Bond

Autre

Une esthétique parfaite des bords de l'obturation.

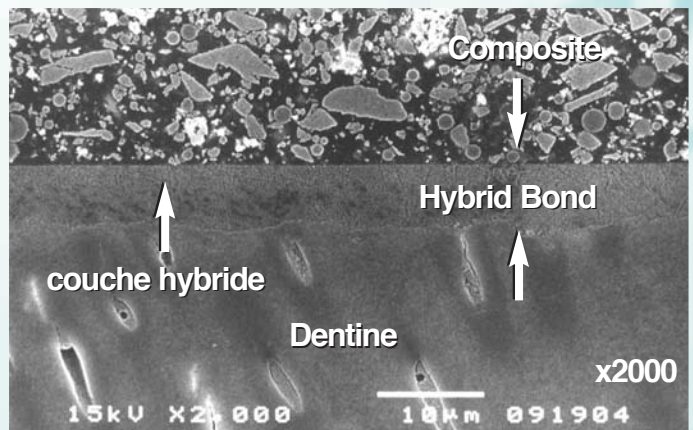

couche hybride

Dentine

Composite

Hybrid Bond

x2000

15kV X2,000

10µm 091904

Source : Dr Nikaido, Tokyo Medical and Dental University



Un produit SUN MEDICAL distribué par  
GENÉRIQUE INTERNATIONAL

77 rue Brossolette 93160 Noisy le Grand  
Tél. 01 43 03 06 84 Fax. 01 43 03 15 98

site : [www.generiqueinternational.com](http://www.generiqueinternational.com)  
E-mail : [generinter@aol.com](mailto:generinter@aol.com)



CE  
0123