

# Hybrid Cem

Cemento resina POLVERE/ LIQUIDO auto-fotopolimerizzabile per il fissaggio di corone, bridges, onlays, inlays

- Semplice** 1 Mordanzare il dente  
**Rapido** 2 Miscellare polvere + liquido  
**Efficace** 3 Sigillare



**NON USARE ADESIVO !!!**

## I Vantaggi

- Elevata adesione —
- Molto semplice da miscellare —
- Tempo di lavorazione ideale —
- Radiopaco —
- Facile rimozione degli eccessi —



## Efficacita Ottimale

**Tempi di lavoro ideali !** Stendendo sul blocco in sottile strato la miscela polvere-liquido, il tempo di lavoro è di dieci minuti !

Tempi di lavoro	
	0 1 5 10 (Minutes)
HybridCem	0 1 5 10
RMGI*	0 1 5 10

\* verres ionomères modifiés à la résine

**Rifinitura molto facile !** Due minuti dopo l'applicazione (o dopo 10 sec. Di fotopolimerizzazione) gli eccessi di cemento possono essere rimossi.



**Una messa in opera semplice !** Mordenzare la superficie del dente con l'attivatore verde, sciacquare ed asciugare. Miscelare la polvere ed il liquido e cementare il manufatto. E' inutile utilizzare un adesivo o un primer.

**Un cofanetto consente di realizzare una media di 200 cementazioni**

**Hybrid Cem**  
 Cemento resina per uso odontoiatrico a base di 4 Meta

Il cofanetto contiene :  
 1 liquido 3,3 ml, 1 polvere 3,5g, 1 attivatore di dentine verde 2,5ml, 1 spatola di miscelazione, 1 misurino, 1 blocco di miscelazione.

