

4

Collage d'un Inlay/facette Céramique ou Composite

Super-bond C&B est recommandé sur dents vivantes

Etape optionnelle au Laboratoire : - mordancer l'intrados de l'Inlay céramique avec l'acide fluorhydrique

Etape préalable au Cabinet : - essayer en bouche l'Inlay puis appliquer les procédures suivantes...

Composants :

Super-Bond C&B +
Porcelain LinerM



Nettoyer l'inlay avec l'activateur rouge (30sec)




Rincer



Sécher



Porcelain Liner M
Mélanger 1 goutte de liquide A plus 1 goutte de liquide B

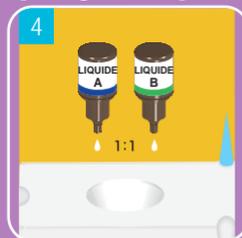

Appliquer le mélange Porcelain Liner M



Sécher rapidement



OPTIONNEL : chauffer l'intrados de l'inlay, améliore la qualité du collage



Mordantage émail/dentine avec l'activateur vert OU BIEN

utiliser votre gel d'acide phosphorique à 37% sur toutes les surfaces



Rincer



Colle chémpolymérisable viscoélastique


Super-Bond C&B

4 Collage d'un Inlay/Facette Céramique ou Composite

Sécher



Sortir le godet de mélange du réfrigérateur. Essuyer

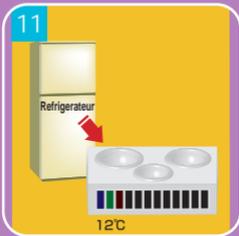

Dosage 4 gouttes de Monomer
+ 1 goutte Catalyseur
+ 1 petite dose
de la cuillère standard



Mélanger rapidement
(3-5 sec)



Application du mélange



Mise en place



Retirer les excès
avec un coton alcoolisé



Retirer les excès à la sonde



Maintenir une pression
passive (5 minutes)



8 à 10 minutes avec
le Monomer normal



5 minutes avec le
Quick Monomer

Assistance technique
par un chirurgien dentiste :
01 43 03 06 84

MORITA

SUN MEDICAL

GÉNÉRIQUE
INTERNATIONAL