

Super-bond C&B

Quelques protocoles simples pour une utilisation OPTIMALE du **Super-Bond C&B**, la colle de référence depuis 1982.

En pratique...

- 1 Conseils Pratiques (au verso)
- 2 Collage d'une couronne
- 3 Collage d'un Inlay core métallique
- 4 Collage d'un Inlay/Facette céramique ou composite
- 5 Contention de dents mobiles
- 6 Réparation au composite d'une céramique fracturée (avec métal visible)
- 7 Réparation d'une céramique fracturée (avec fragments de céramique)

Assistance technique
par un chirurgien dentiste :
01 43 03 06 84



1 Conseils Pratiques



- 1** Conserver le godet de mélange fourni en **PERMANENCE** au réfrigérateur
- 2** Sortir au **DERNIER MOMENT** le godet du réfrigérateur
- 3** Avec un godet **REFROIDI**, le mélange est **FLUIDE**, ceci est normal
- 4** **Elimination des excès :**
 - immédiatement après la mise en place, retirer les excès avec un coton alcoolisé
 - ensuite le produit devient filant (ne pas tirer sur le joint)
 - enfin le produit devient plus rigide, utiliser alors un instrument coupant (curette ou bistouri) pour éliminer les excès restant
- 5** Attendre **IMPERATIVEMENT** la prise complète (**5 minutes** avec le **Quick Monomer**) pour faire les finitions