

NOVITA'

Hybrid Root SEAL

Endocavità stagne a livello apicale e della corona!!!!



Dalla tecnologia Super-Bond C&B, il Cemento automordenzante per la otturazione canalare - Polimerizzazione Duale (Auto-Foto).

Hybrid Root SEAL si applica facilmente :

1 cucchiaino di Polvere radiopaca + 3 gocce di Liquido ET mescolare sul blocco di miscelazione



Vantaggi :

- Sigillatura immediata a livello della camera pulpale mediante fotopolimerizzazione rapide di 20 sec !!
- Preparazione d'un ancoraggio per perno radicolare possibile 10 minuti dopo l'otturazione canalare
- Tempi di lavoro ideale : fino a 35 minuti !!
- Realizzazione d'uno strato ibrido con la dentina radicolare
- Incollaggio a tenuta stagna della Gutta Percha

Hybrid Root SEAL può essere applicato nel canale con punte o con il lentolo

Hybrid Root SEAL dopo 5000 cicli nessuna penetrazione di colorante



(risciacquo con ipoclorito)



UN VERO STRATO IBRIDO RADICOLARE

L'idrofobicità di Hybrid Root SEAL permette l'avvio della polimerizzazione a contatto della parete del canale radicolare. L'umidità residua non perturba affatto la totale presa del cemento canalare.

La presa Auto sarà accelerata dall'rapporto di calore; per questo le tecniche "fredde" d'otturazione utilizzando la Gutta Percha sono raccomandate con Hybrid Root SEAL.

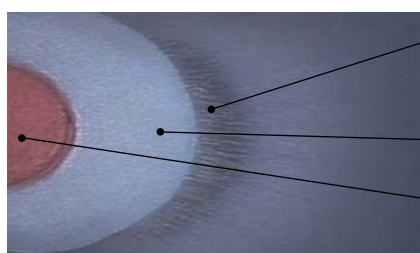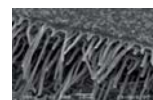

collaggio della Gutta Percha !!



Il cofanetto di Hybrid Root SEAL permette d'otturare 50 canali radicolari!!

Hybrid Root SEAL en résumé :

- Otturazione canalare
- Facile manipolazione
- Tempo di lavoro confortevole
- Eccellente biocompatibilità

Contenuto:

Liquido 4,5ml, polvere 5g,
1 dosatore , 1 spatola, 1 blocco di
m iscelazione



Novità 2007, il sito internet : www.generiqueinternational.com

UN PRODOTTO SUN MEDICAL



GENERIQUE INTERNATIONAL
77 rue Brossolette 93160 Noisy le Grand
Tél. 01 43 03 06 84 Fax. 01 43 03 15 98
generinter@aol.com

