

Utilisation du SEP pour faciliter la dépose d'une couronne provisoire ....



Si le ciment temporaire est trop retentif...

## Application du SEP

*Super-Bond SEP est appliqué avec une éponge sur les surfaces préparées.*

*Puis sécher la surface avec la seringue à air.*

*La couche doit être suffisamment épaisse pour permettre une dépose facile même avec un ciment temporaire trop retentif.*



## Après l'application du SEP

*Mettre le ciment temporaire dans l'intrados de la couronne.*

*Sceller la couronne*

*Déposer la couronne à la séance suivante*

*SEP sera finalement éliminé de la préparation par 5 sec de rinçage avant le scellement de la couronne définitive.*

