

# SEP

Super-Bond  
SEP

## le nouvel isolant/séparateur

- Non Gras
- Coloré en bleu
- Totalement hydrosoluble : rinçage à l'eau
- Ne colore pas les Résines

### SEP simplifie tous les collages et tous les scellements



#### Scellement / Collage de couronne, bridge, facette.



Appliquer SEP sur les faces proximales des dents adjacentes



Appliquer SEP sur les bords externes de la couronne/facette  
Mettre en place la couronne/facette



Retrait ultra facile des excès.



Elimination du SEP par rinçage

#### Réalisation d'une couronne provisoire en résine.



Appliquer SEP sur la dent préparée (même pulpée), séchée.



Confection de la dent provisoire en résine : la résine ne colle pas à la dent!



Elimination du SEP par rinçage



Scellement de la dent provisoire

#### Confection d'un Inlay provisoire composite.



Appliquer SEP dans la cavité



Mise en place du composite



Retrait et contrôle de l'Inlay composite



Elimination du SEP par rinçage avant le scellement de l'Inlay

CE

MORITA

SUN MEDICAL

GENERIQUE INTERNATIONAL  
77 rue Brossolette 93160 Noisy le Grand  
Tél. 01 43 03 06 84 Fax. 01 43 03 15 98

site : [www.generiqueinternational.com](http://www.generiqueinternational.com)  
E-mail : [generinter@aol.com](mailto:generinter@aol.com)

GENÉRIQUE  
INTERNATIONAL