

Super-Bond **Porcelain Liner M**

Specifico per l'incollaggio della ceramica



In combinazione con **SUPER-BOND C&B**, **Porcelain Liner M** permette di incollare efficacemente **la ceramica**.

La scatola contiene :

Liquido A.....	5ml
Liquido B.....	5ml
Tazze di plastica.....	15 parti
Spugne (L-S).....	1

Porcelain Liner M è un agente d'adesione di tipo silano che si lega chimicamente alla ceramica.

In questo modo, con SUPER-BOND è ora possibile incollare la ceramica senza doverla mordenzare con acido fluoridrico.



Indicazioni

- Riparazioni direttamente in bocca della ceramica fratturata.
- Incollaggio d'inlays. Onlays, faccette in ceramica.
- Incollaggio di brackets ortodontici su denti in ceramica.

PORCELAIN LINER M + SUPER-BOND C&B...

UNA FORMIDABILE COMBINAZIONE PER INCOLLARE LA CERAMICA

Da numerosi anni SUPER-BOND C&B conferma il suo straordinario potere di adesione sia al dente che ai metalli.

Ora, a seguito del trattamento con Porcelain Liner M, SUPER-BOND C&B aderisce perfettamente alla ceramica non mordenzata.

Vantaggi clinici :

- Eliminazione della mordenzatura acida.
- Applicazione semplice e rapida.

Risultati eccezionali :

Esempi d'applicazione clinica

1 Riparazione intraorale



2 Incollaggio d'inlays in ceramica



Caso clinico del Dr Pissis, Paris-France

3 Incollaggio di brackets ortodontici



Valori d'adesione

① Incollaggio di ceramica VITA (smerigliata con carta vetro 600) su acciaio inossidabile *1

Valori d'adesione *3 (MPa)

Numero di cicli termici (4°C - 60°C)	1,000	5,000	10,000
Porcelain Liner M Super-Bond C&B	20	19	13
Agente adesivo per ceramica (importato)	20	12	4
Super-Bond C&B senza Porcelain Liner M	8	-	-

② Incollaggio di ceramica VITA (superficie lucida) su acciaio inossidabile *2

Valori d'adesione *3 (MPa)

Numero di cicli termici (4°C - 60°C)	1,000	5,000	10,000
Porcelain Liner M Super-Bond C&B	20	19	9
Agente adesivo per ceramica (importato)	20	5	3